

安全な
インプラント治療
をサポート

手術時間が
短い

治療計画が
確認できて
安心

当院ではノーベルバイオケア社の
製品を使用しています。

▶ノーベルバイオケアとは

ノーベルバイオケアは、近代歯科インプラントを世界で初めて製品展開した、審美歯科修復製品の総合メーカーです(本社:スイス)。近代インプラントシステムのパイオニアとして一番長い歴史を誇り、その製品は世界70カ国以上で使用されています。



▶ノーベルバイオケア 患者カード

ノーベルバイオケアの製品を使用した治療により、「ノーベルバイオケア 患者カード」がもらえます。本カードを携帯することによって、患者様ご自身による治療記録の保管が可能になるとともに、この治療記録をもとに、転居先でもメンテナンスが可能です。



医療機関名:



ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社
www.nobelbiocare.co.jp

OP010 1206


安全・安心なインプラント治療を
サポートするために



デジタル技術を活用したシステム

ノーベルガイドの
ご案内

インプラント治療とは

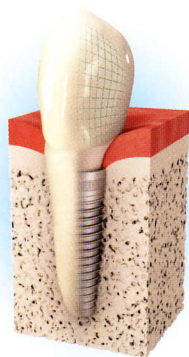

失ってしまった自分の歯の代わりにあごの骨にチタンのネジを埋め込み、人工の歯で噛めるようにする治療法です。チタンは骨と結合する特性を持つため、従来の治療法に比べ噛んだり話したりしやすくなります。

ノーベルガイドとは


CT撮影データとシミュレーション ソフトウェアを組み合わせ、治療計画をサポートするコンセプトです。手術の前に骨の形態や質、神経の位置等を把握し、安全・安心な治療をサポートします。また、計画どおりにインプラントを埋め込むために、患者様ごとにサージカル・テンプレート(手術用補助器具)を作製して使用する場合があります。



ノーベルガイドを利用した治療の流れ

1 CT撮影


CTとはX線を利用して体内の断面図を撮影する技術で、立体的に神経、血管、骨などの様子を把握することができます。

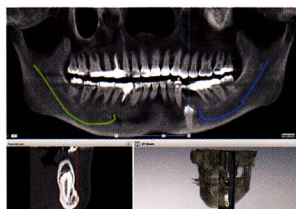

骨の形や質、高さや幅には個人差があります。また、骨の中には神経や太い血管が通っています。

2 コンピューター上で治療を計画

歯科医師はCT撮影データから得られた情報をもとに、神経や太い血管を避けながらインプラントの埋め込み位置を計画します。

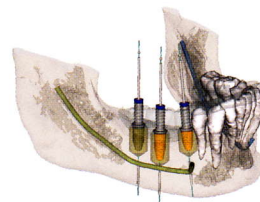

埋め込むインプラントのサイズや、角度、深さ等をソフトウェアでシミュレーションします。


3 治療方法・費用のご説明

歯科医師が、画像をご覧に入しながら治療の計画内容や費用の詳しい説明をします。



4 インプラント手術

治療計画に基づいてインプラントを埋め込むために、サージカル・テンプレートをお口に取り付けます。そして、インプラントを埋め込みます。

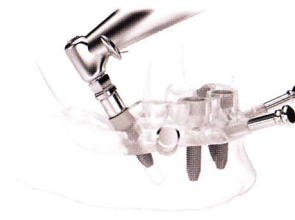


インプラントを埋め込んだ日に仮歯をつけて帰宅できる場合もあります。

経過観察

5 最終的な歯の取り付け

インプラントと骨が結合している良好な状態を確認した後、最終的な歯を取り付けます。

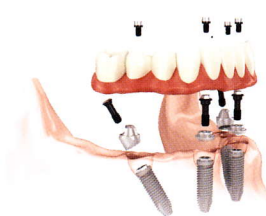

注意事項

ノーベルガイドは、安全・安心なインプラント治療をサポートするためのシステムです。インプラントの手術には様々な方法があり、必ずしもパンフレットに記載されている方法で行われるとは限りません。